



# DENTAL *Noplak N*

PROTHETIKREINIGER-KONZENTRAT – ZUR TÄGLICHEN PFLEGE IM ULTRASCHALLBAD



## Vorteile

DENTAL Noplak N entfernt Beläge, Speisereste und Verfärbungen (auch Tee, Nikotin und Kaffee-Ablagerungen) zuverlässig und porentief. Speziell für die tägliche Reinigung von herausnehmbarem Zahnersatz entwickelt, weißt es eine optimale Materialverträglichkeit für die in der Zahntechnik verwendeten Materialien auf. Das Konzentrat wird mit Leitungswasser (1:10 bis 1:20) verdünnt. Die Anwendung kann mit und ohne Ultraschall erfolgen.

## Highlights

- Konzentrat
- Wasserlöslich
- Made in Germany
- Sichere, porentiefe Reinigung
- Optimale Materialverträglichkeit\*
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Chlorfrei, bleicht Prothesen nicht aus

**DENTAL Noplak N** ist ein wasserlöslicher Prothetikreiniger/Zahnsteinlöser auf spezieller Wirkstoffbasis zur täglichen Reinigung von Zahnprothesen und Zahnspangen. DENTAL Noplak N entfernt Beläge, Speisereste und Verfärbungen (auch Tee, Nikotin und Kaffee-Ablagerungen) sicher und zuverlässig von Zahnprothesen, herausnehmbarem Zahnersatz etc. DENTAL Noplak N ist chlorfrei und bleicht den Prothesenkunststoff nicht aus.

**BESTELLSHOTLINE 040 25 77 67 570**

\* DENTAL Noplak N ist für Edelmetall, Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Glas und Gummi geeignet. Achtung: Bitte halten Sie DENTAL Noplak N von Marmor- und Naturstein fern.

**DENTAL***impulse*  
BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Sülldorfer Kirchenweg 131  
D 22589 Hamburg  
Telefon 040 25 77 67 570  
Freefax 0800 879 30 29



# DENTAL *Noplak N*

PROTHETIKREINIGER-KONZENTRAT – ZUR TÄGLICHEN PFLEGE IM ULTRASCHALLBAD

## ANWENDUNG IM ULTRASCHALL- ODER POLIERNADELBAD

D1 Teil DENTAL Noplak N mit 10 bis 20 Teilen Wasser verdünnen und im Ultraschall- bzw. Poliernadelbad verwenden. Bei Verwendung im DENTALYsonic Ultraschall-Reinigungsgerät schütten Sie bitte 1-2 Verschlusskappen der 100ml Flasche, das entspricht ca. 10ml, in den herausnehmbaren Flüssigkeitstank und füllen diesen mit warmen Wasser bis zur max. Füllhöhe (siehe Füllhöhenbegrenzung „MAX“ im Tank) auf. Je nach Verschmutzungsgrad kann die Reinigungszeit zwischen 5 Minuten und 30 Minuten variieren, bei alten und sehr starken Verunreinigungen beim 1. Reinigungsgang bis zu 60 Minuten.

## ANWENDUNG DURCH EINLEGEN IN DIE LÖSUNG

Bei Einsatz des DENTAL Noplak N ohne Ultraschall bitte 1 Teil DENTAL Noplak N mit 5 Teilen heißem Wasser verdünnen und die zu reinigenden Teile mindestens 2 Stunden oder über Nacht einlegen.

Die anwendungsfertige Lösung kann, in Abhängigkeit der Verunreinigung, bis zu einer Woche verwendet werden. Bitte verwenden Sie DENTAL Noplak N niemals ohne die Verdünnung, da das Hochkonzentrat nur in Verbindung mit Wasser seine Aktivität entfalten kann.

## LIEFERFORM


Flasche, 1000 ml  
(links) Art-Nr. 536011  
Flasche, 100 ml  
(unten) Art-Nr. 536001

## SICHERHEITSHINWEISE

Es gelten keine besonderen Vorschriften zum Transport und zur Lagerung. DENTAL Noplak N reizt die Augen und die Haut (R36/38), aus diesem Grund bitte Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht einnehmen.

## ENTSORGUNG

Die Gebrauchslösung mit Wasser verdünnt in den Abfluss geben. Verschüttetes DENTAL Noplak N aufnehmen, die benetzte Oberfläche mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.

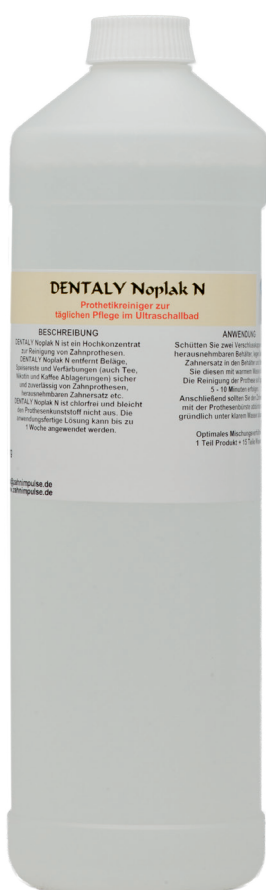

## Technische Daten

Zustand	flüssig
Farbe	orange
Dichte (20 °C)	1,205 g/ml
pH-Wert	2,1
Zusammensetzung	< 5% : nicht ionische Tenside, Phosphorsäure

## TIPP: Prothesenpflege-Set

Das Zahnprothesenpflege-Set „DENTALYsonic“ besteht aus einem Ultraschall-Reinigungsgerät, 100ml Prothetikreiniger DENTAL Noplak K, einer Trioblanc® Prothesenbürste und einem Leitfaden zur Anwendung. Der Prothetikreiniger und das Ultraschall-Reinigungsgerät sind optimal aufeinander abgestimmt und bieten Ihnen so eine komfortable und wirksame Form der Zahnprothesenpflege.



## BESTELLSHOTLINE 040 25 77 67 570

Die Angaben sollen unverbindlich beraten und verstehen sich unter Vorbehalt eventueller Änderungen der Zusammensetzung sowie rechtlicher und sonstiger Sicherheitsvorschriften. Sicherheitsdatenblatt, Bestellmöglichkeiten und aktuelle Preise finden Sie u.a. auf unseren Internetseiten oder sprechen Sie uns gerne an.

**DENTAL***impulse*  
BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

www.dentalimpulse.de

Sülldorfer Kirchenweg 131  
D 22589 Hamburg  
Telefon 040 25 77 67 570  
Freefax 0800 879 30 29