




Injector DS 50

Gebrauchsinformation

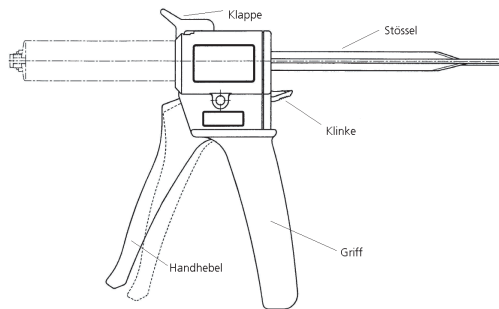

Produktbeschreibung:

Die Injectoren DS 50 mit den Artikelnummern D-5006; D-5007 und D-5008, dienen der einfachen und exakten Applikation von dentalen Abformsilikonon sowie dentalen Bißregistraten, welche in der S 50 Sicherheitskartusche der Firma Sulzer MixPac dargereicht werden.
Bitte die beiden verschiedenen Varianten für die Austragverhältnisse von 1:1/2:1 sowie 4:1/10:1 beachten.

Anwendung:

1. Um den Stößel frei bewegen zu können und ihn somit vollständig nach hinten bis zum Anschlag in Position bringen zu können, muss die Klinke nach oben gedrückt und gehalten werden. *Bild 1*
2. Die Klappe des Injectors öffnen, die Kartusche mit der Nut nach unten einlegen und die Klappe wieder schließen. *Bild 3+4*
3. Den Stößel manuell bis zum Kolben der Kartusche nach vorne schieben.
4. Die Verschlußkappe der Doppelkartusche entfernen und durch betätigen des Handhebels soviel Material vorfordern, bis aus beiden Austrittsöffnungen der Doppelkartusche ein gleichmäßiger Materialaustritt zu beobachten ist.
5. Nun die passende Mischkanüle auf die Doppelkartusche aufsetzen und die gewünschte Menge des Materials durch leichtes drücken des Handhebels austragen.

1.



2.



3.



Desinfektion:

Um mögliche Ansteckungen zu vermeiden, kann der Injector nach jedem Einsatz mit Desinfektionsmittel behandelt werden.

Wichtige Hinweise:

1. Der Injector ist nur für den Gebrauch von Sulzer MixPac S 50 Kartuschen zulässig.
2. Den Injector nach Gebrauch ordnungsgemäß aufbewahren
3. Um Beschädigungen am Injector auszuschließen, muss der Handhebel vorsichtig und gleichmäßig betätigt werden.

Stand der Informationen: Dezember 2020/CL

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: ++49 2303 8807-0

Max-Planck-Str. 31, 59423 Unna / Germany
Fax: ++49 2303 8807-55

info@dreve.de

www.dreve.com